

Instrução de Uso em formato não impresso conforme IN N°4 de 15/06/12

Esta Instrução de Uso está disponível no site: www.factorycirurgico.com.br

Para consultar no site a instrução de uso pertinente ao produto desejado, basta verificar no rótulo o número de registro, o número de referência do produto e o modelo comercial.

Modo de Uso do Produto

- 1 - Utilizando uma chave digital (não acompanha o produto), parafusar o análogo ao transferente de moldagem contido no molde. O torque (aperto) deve ser manual.
- 2 - Vazar o gesso sobre o molde, de modo a cobrir todo o análogo.
- 3 - Após o endurecimento completo do gesso, separar o molde do modelo de gesso, obtendo assim o modelo de trabalho em gesso com o análogo.
- 4 - O modelo de trabalho em gesso com o análogo reproduz exatamente a posição do implante instalado na cavidade bucal do paciente.

Condições de Armazenamento

Deve ser armazenado em sua embalagem original, em local limpo e seco, em temperatura ambiente e protegido de radiação solar direta.

Armazenar longe de produtos e resíduos químicos que possam desprender vapores corrosivos.

Condições para o Transporte

Deve ser transportado em local limpo e seco, de modo a evitar danos a embalagem.

Não transportar com produtos e resíduos químicos.

O transporte deve ser qualificado conforme os requisitos de Boas Práticas.

Condições de Manipulação

Destinado a procedimento especializado e deve ser executado por profissionais habilitados.

Utilizar o produto com o conhecimento das técnicas adequadas e executá-las sempre em condições apropriadas.

Advertências

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada e/ou sem instrução de uso.

Observar a plataforma, o sistema de encaixe e a rosca do implante ou componente protético ao qual será fixado, utilize somente o Análogo que seja compatível.

O encaixe do Análogo com o transferente de moldagem ou com outro componente protético deve ser suave e sem folgas, evitando deformações e engripamentos das conexões.

Para evitar contaminação ambiental ou uso indevido, realizar o descarte conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (P.G.R.S.S.) do local que o gerou.

Não reutilizar.

Precauções

Evite torque excessivo nos parafusos protéticos.

Melhores resultados são obtidos com a utilização da sequência de produtos Factory Instrumental Cirúrgico.

A utilização de instrumentais e/ou componentes protéticos de outros fabricantes não assegura a perfeita função do sistema e isenta qualquer garantia do produto.

Contra Indicações

Não há contra indicações

Efeitos Adversos

Não ocorrerão efeitos adversos, desde que sejam atendidas todas as recomendações presentes na Instrução de Uso.

Modelos Comerciais:

ANA0602701 - Análogo em Inox HE 3,30 AA

ANA0602702 - Análogo em Inox HE 5,00 AA

ANA0606401 - Análogo em Inox HE 3,30 BL

ANA0606601 - Análogo em Inox HE 3,50 BN

ANA0608501 - Análogo em Inox HE 3,40 CG

ANA0608502 - Análogo em Inox HE 4,10 CG

ANA0608503 - Análogo em Inox HE 5,00 CG

ANA0610101 - Análogo em Inox HE 3,50 CW

ANA0610102 - Análogo em Inox HE 5,10 CW

ANA0610301 - Análogo em Inox HE 3,50 CY

Explicação da simbologia utilizada no rótulo	
	Número de referência
	Número de lote
	Data de validade
	Fabricante
	Data de fabricação
	Não utilizar se a embalagem estiver violada
	Não estéril
	Não reutilizar
	Consultar as instruções de uso
	Mantenha seco
	Mantenha ao abrigo do sol

Fabricado por: Factory Instrumental Cirúrgico Indústria e Comércio LTDA.

Rua: Ambrosia do México, 392-398, Jd. Cidade Pirituba

CEP: 02945-040 - São Paulo - SP - Brasil

CNPJ: 56.294.952/0001-10

Insc. Estadual 111.573.179.110

Autorização de Funcionamento: 8.02.183-1

www.factorycirurgico.com.br – SAC: +55 11 3972-4847

Responsável Técnico Eng. Rogério Guedelha Massano

CREA-SP: 5063257311

Registro ANVISA: Isento

Revisão 00-03/16